

from
SAVE.
to vita...

Royax Medical
Solution

Uživatelská příručka



Filtrační respirátor obličeje

Katalogový kód: R-DP-R-FFP2-01
ROYAX S.R.O.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt ROYAX

Tato příručka je navržena tak, aby poskytovala informace potřebné k používání respirátoru na obličej (dále jen „produkt“ nebo „respirátor“).

Zřeknutí se odpovědnosti: V tomto dokumentu jsou obsaženy všechny příslušné pokyny k používání produktu a bezpečnostní opatření. ROYAX nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím produktu. Důrazně se doporučuje, aby uživatelé před a po použití dodržovali všechny tyto pokyny pro správné používání tohoto produktu. **Tato příručka neposkytuje žádné lékařské rady ani pokyny.**

Vlastnická práva: Informace obsažené v této příručce jsou vlastnictvím ROYAX (dále jen „Výrobce“), Česká republika. ROYAX si vyhrazuje práva na design a výrobu tohoto produktu.

Zachování příručky: Tato příručka musí být uchovávána společně s výrobkem po celou dobu životnosti produktu.

Likvidace produktu: Odstranění a likvidace musí být prováděna velmi pečlivě, protože samotný produkt se může během používání stát zdrojem infekce. Postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Legislativa:

EN149: 2001 + A1: 2009 se částečně týká

RfU02.075 revize 1 oznámených subjektů VG2 proti COVID-19

PPE (EU) 2016/425

ROYAX s.r.o.: Obchodní 107, Čestlice, Česká republika

T/F: +420 321 123 111/2

www.royax.eu

info@royax.eu

1. POPIS	3
1.1 Součásti respirátoru	3
1.2 Pokyny respirátora	4
1.3 Odstranění respirátoru	4
1.4 Varování	4
1.5 Informace notifikovaného subjektu	5
2. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA A DOPRAVA	5
2.1 Čištění a dezinfekce	5
2.2 Údržba	5
2.3 Doprava	5
3. SYMBOLY A JINÉ POTŘEBNÉ INFORMACE	5
3.1 Platnost	5
3.2 Symboly	6



1. POPIS

Vysoce kvalitní a výkonné respirátory Royax pracují s využitím elektrostatických vlastností, aby přilákaly a poté zachytily nejmenší z existujících částic.

Náš respirátor je určen k ochraně před živými organismy, jako jsou viry, bakterie, houby a také jemný prach, vlákna, vodní mlhy, mlhy na bázi oleje. Mikroorganismy (viry, bakterie, houby) mohou být přenášeny různými způsoby.

Ochrana dýchacích cest je nutná, aby se zabránilo infekci organismy, které obvykle vstoupí do těla inhalací (kapičky / vzduchem). Respirátor by měl být používán společně s dalšími OOP pro zdravotnického pracovníka. Respirátor se doporučuje pro zdravotnické pracovníky nebo personál (HCP), kteří jsou v kontaktu s potvrzeným nebo podezřelým případem přípravy Covid-19. Ochrana dýchacích cest je také zásadní snížit riziko šíření infekcí ve vzduchu, když lidé kašlí, kýchají nebo mluvit.


Ochrana dýchacích cest je také zásadní snížení rizika šíření infekcí ve vzduchu, když lidé kašlou, kýchají nebo mluví.

Náš produkt těsně přiléhá k obličeji, tak aby zajistil co největší těsnění. Navíc je zabudována nastavitelná svorka na nos, která zabraňuje úniku a poskytuje pohodlí.

Respirátor musí být nasazen a odstraněn způsobem, který minimalizuje možnost křížové kontaminace. Nedodržení všech pokynů a omezení týkajících se používání tohoto respirátoru a / nebo opotřebení tohoto respirátoru po celou dobu expozice může snížit účinnost respirátoru a může mít za následek nemoc nebo smrt


Respirátory mají čtyřvrstvou konstrukci (viz obrázek 1.1 níže), obsahující dvě vrstvy vysoce kvalitního spřádaného pojivového materiálu s hladkým povrchovým povrchem, který pokrývá dvě vrstvy vynikajícího filtračního materiálu foukaného z taveniny, který je elektrostaticky nabitý. Elektrostatický prvek přitahuje a poté zachycuje nejmenší částice, přičemž zůstává snadno dýchatelný. Konstrukce bez ventilu zajišťuje, že uživatel nevydechuje potenciálně škodlivé organismy vůči ostatním v okolí. Výrobek je šetrný k pokožce a bez alergií.

1.1 Součásti respirátoru

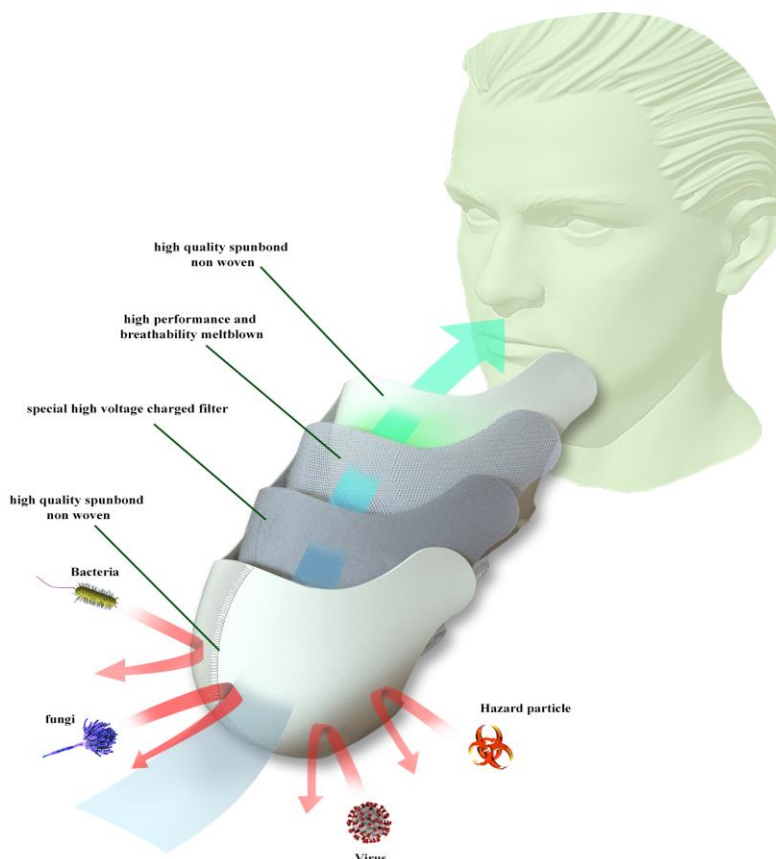

1.2. Pokyny respirátora:

- 1) Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce.
- 2) Držte respirátor tak, jak je to znázorněno, s nosní částí na špičkách prstu.
- 3) Zvedněte respirátor na obličej a umístěte jej tak, aby byl zakryt nos a ústa.
- 4) Zajistěte respirátor tahem za popruhy za každým uchem.
- 5) Jemně sevřete nosní část a pohodlně a elegantně upravte lícování přes nos a kolem obličeje.
- 6) Oběma rukama přidržte přední část respirátoru a zkontrolujte ji pro únik vzduchu kolem úst a nosu. Ty by měly být těsné.

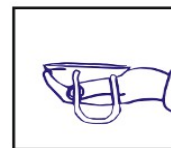

1.3. Odstranění respirátoru:

Během používání mohou být respirátory kontaminovány a neměly by se jich dotýkat. Pokud se však dotknete rukou, musíte je okamžitě a důkladně omýt.

Odstranění a likvidace musí být prováděny velmi opatrně, protože při používání se respirátor sám může stát zdrojem infekce.

Pokyny pro odstranění:

- Ušní smyčku vytáhněte zpoza jednoho ucha a poté za druhé.
- Držte respirátor za ušní smyčku.
- Ihned zlikvidujte ve správném obalu.
- Hygiena rukou by měla být prováděna po odstranění a likvidaci respirátoru.



1.4. Varování:

- Pokud je respirátor poškozen nebo je kontaminován dýcháním sekretů nebo jiných tělních tekutin, je třeba je vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
- Nepoužívejte, pokud je respirátor extrémně zmačkaný.
- Nepoužívejte s vousy nebo jinými vlasy na obličeji nebo pokud jiné obličejové podmínky brání dobrému utěsnění mezi obličejem a okraji respirátoru.
- Nepoužívejte v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5%.
- Nepoužívejte ve špatně větraných prostorech.
- Nepoužívejte k hašení požáru a pískování.
- Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nenávratně dýchací přístroj.
- Respirátor poškozuje také autoklávování a jiné formy zahřívání.
- Opakované použití je zakázáno.
- Respirátor se nesmí používat déle než na jedno použití.
- Nedotýkejte se přední části respirátoru, když jej odstraňujete.
- Respirátor vyměňte za nový, jakmile bude vlhký.
- Nepoužívejte ve výbušné atmosféře.
- Respirátor skladujte mimo kontaminované oblasti, pokud se nepoužívá.
- Likvidujte použitý produkt v souladu s platnými předpisy vaší země.

1.5. Informace notifikovaného orgánu

Notifikovaný orgán pro module B+C2	MTIC InterCert s.r.l Via Moscova,11-20017 RHO(MI)- Itálie
Číslo notifikovaného orgánu notifikovaného orgánu	0068

2. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA A DOPRAVA

2.1. Čištění a dezinfekce:

Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nevratně dýchací cesty.

2.2. Údržba:

Životnost respirátoru závisí na době používání, péči a údržbě. Před použitím produkt důkladně zkontrolujte. Pokud je některá část výrobku poškozena, okamžitě vyměňte celý produkt. Doporučujeme, aby respirátor byl uchováván ve vhodném čistém obalu

nebo obalu, pokud se nepoužívá. V každé situaci musí být produkt vyměněn po uplynutí jedné směny (maximálně 8 hodin).

2.3. Doprava:

Výrobek musí být přepravován v původním obalu (celofán).



3. SYMBOLS SYMBOLY A JINÉ POTŘEBNÉ INFORMACE

3.1. Platnost:

Produkt je platný 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

Vysvětlení označení na výrobku a balení

3.2. Symboly

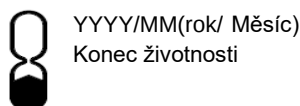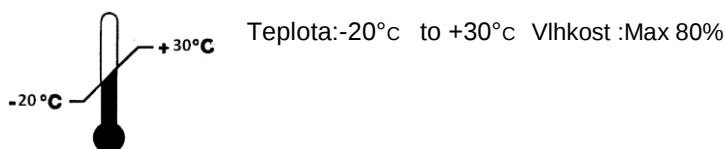

Referenční číslo pro identifikaci produktu



Číslo šarže produktu pro sledovatelnost produktu

Pro:


Datum výroby



konec životnosti




Viz informace poskytnuté výrobcem

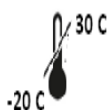

Minimální a maximální skladovací teplota



Maximální povolená vlhkost pro skladování

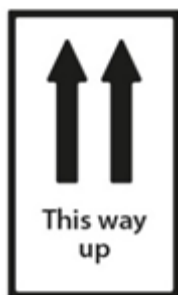


Správný směr k
Uložení




Maximální vlhkost
povoleno pro skladování



Drž se dál od
sluneční světlo

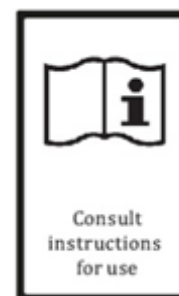


Poradte se s návodem k použití
a poskytnuté informace
od výrobce

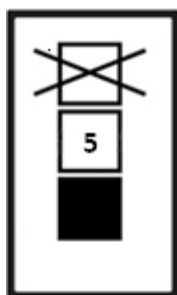

Nedávejte více než
5 krabic na vrcholu
navzájem



držte se dál od ohně

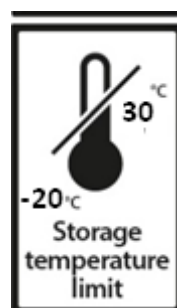

skladovací teplota



nosit ručně



referenční číslo pro identifikaci produktu



Produkt je stohovatelný